


NL

FR

**Vóór het eerste gebruik van het afkolfsetje:**


Kook alle onderdelen - behalve slang, verbindingkapje en verbindingstuk voor de slang - gedurende 20 minuten en vervolgens éénmaal per dag.

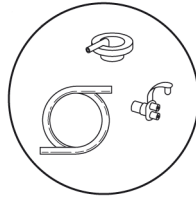

**Avant première usage du set tire-lait:**

Faire bouillir tous les composants - sauf le tuyau, l'embout de l'adaptateur et l'adaptateur du tuyau - pendant 20 minutes. Ensuite une fois par jour.


**A. Wisselstroomadapter** (bijgeleverd)  
**Auto-adapter**  
(niet meegeleverd, apart verkrijgbaar)

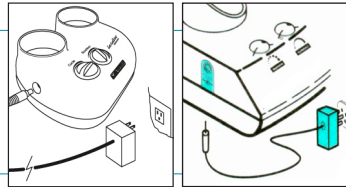

**A. Adaptateur de c.a.** (inclus)  
**Adaptateur de voiture**  
(non inclus; vendus séparément)

**B. Montage**

1. Plaats het diafragma in het bovenste compartiment van het kolfstuk.
2. Klik het verbindingkapje met de slang op het bovenste compartiment.
3. Druk het ventiel voorzichtig maar stevig tegen de ring aan de onderkant van het kolfstuk.
4. Schroef de fles op de juiste maat kolfstuk.
5. Duw het verbindingstuk aan het eind van de slang in de desbetreffende poort van de pomp.

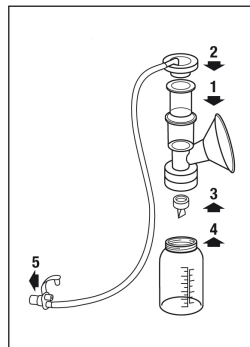


**B. Montage**

1. Insérez le diaphragme dans la chambre supérieure du manchon pour le sein.
2. Insérez l'embout de l'adaptateur avec le tuyau sur le dessus du compartiment supérieur.
3. Poussez la valve avec précaution, mais fermement sur l'anneau sous le manchon pour le sein.
4. Vissez la bouteille sur le manchon pour sein jusqu'à taille exacte.
5. Enfoncez l'adaptateur au bout du tuyau dans l'ouverture en question du tire-lait.

**C. Enkel- en dubbelzijdig afkolven**

1. Voor enkele pomp
2. Voor dubbele pomp

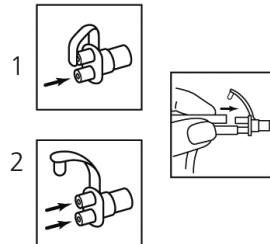


**C. Allaitement simple et double**

1. Pour un pompage simple
2. Pour un pompage double

**D. Pompknoppen**

Gebruik van de knoppen

1. Suction / VACUUM  
U schakelt de pomp in via de regelknop SUCTION. Begin eerst met een kleine vacuüm instelling en verhoog deze pas nadat de melkstroom op gang is gekomen. Dit kunt u op het gevoel doen.
2. Cycle / CYCLES  
Via de regelknop CYCLE kunt u het zuigritme variëren. Begin met een sneller ritme en stel een langzamer ritme in, nadat de melkstroom op gang is gekomen. Zo wordt het zuigritme van de baby nagebootst.

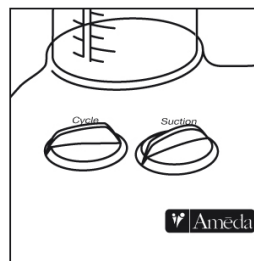


**D. Contrôles du tire-lait**

Usage des boutons de contrôle

1. Suction / VACUUM  
Activez le tire-lait par le bouton de réglage SUCTION. Commencez l'opération en position minimum et augmentez-la à votre convenance, dès que le lait se met à couler.
2. Cycle / CYCLES  
Vous pouvez varier le rythme de succion par le bouton de réglage CYCLE. Commencez par un rythme rapide et diminuez-le, dès que le lait se met à couler. Ce qui permet d'imiter le comportement de la tétée naturelle du bébé.

**E. 6 AA Alkaline of oplaadbare batterijen**  
(niet meegeleverd)

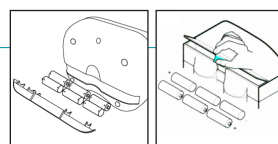

**E. 6 piles rechargeables ou alcalines AA**  
(non inclus)

**F. Maak zo nodig de behuizing schoon**  
met een vochtige doek en een gangbaar huishoudelijk reinigingsmiddel.

**F. Si nécessaire essuyez le boîtier** avec un chiffon humide et avec un détergent courant.